


各部の名称と機能、特徴

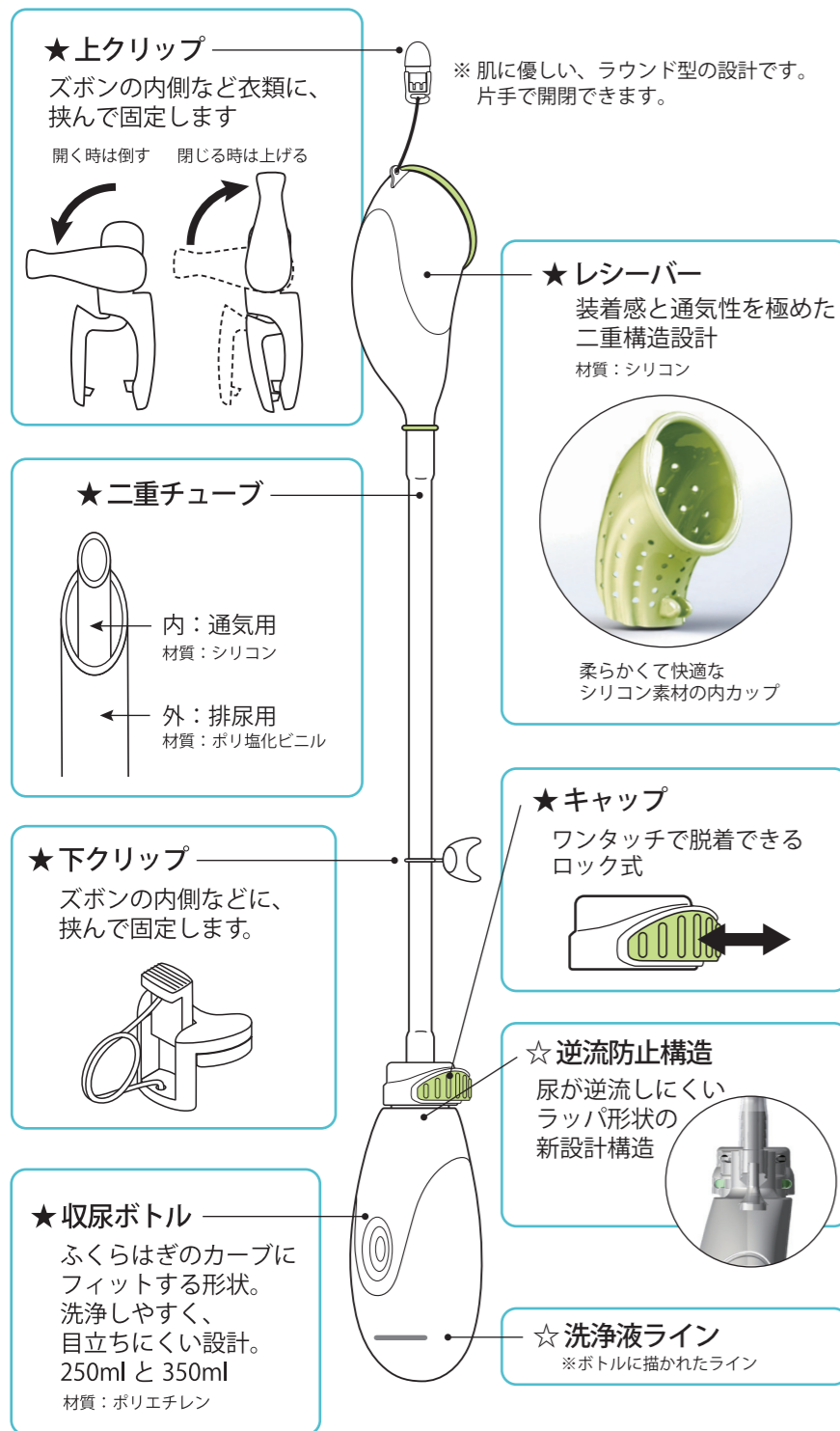

チューブの角度に注意して下さい。

Mr. ユリナーは、重力を利用して収尿する構造です。座位で使用する場合は、レシーバー（ペニス）が一番高い位置にないと尿が収尿ボトルにうまく流れません。



材質・仕様

材質

- ・レシーバー／シリコン
- ・チューブ／外チューブ：ポリ塩化ビニル (PVC)
内チューブ：シリコン
- ・ボトル／ポリエチレン (PE)
- ・キャップ／ポリアセタール (POM)
- ・クリップ／本体：ポリスチレン (PS)
パネ：ステンレス (SUS 304)

サイズ

※ ユリナー全長は、上部クリップ除いた長さです

Sサイズ

- ・股下 ～72cm まで
- ・目安身長 ～160cm まで
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時 / 55cm
350ml ボトル装着時 / 56,5cm

Mサイズ

- ・股下 72～77cm
- ・目安身長 160～170cm
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時 / 60cm
350ml ボトル装着時 / 61,5cm

Lサイズ

- ・股下 77cm～
- ・目安身長 170cm～
- ・ユリナー全長
250ml ボトル装着時 / 65cm
350ml ボトル装着時 / 66,5cm

保証・返品について

※商品の返品・交換について

衛生商品のため、一度使用、または着用された場合は返品をお断りしております。

開封前に必ず足に沿わせて合わせる等し、サイズを確認して下さい。

万一、お届けした商品が破損・サイズ違いの場合は、お手数ではございますが到着後 10日以内にご連絡下さい。送料当社負担で良品とお取替えいたします。

注意事項



注意

- ・ご使用になる前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ・使い慣れるまでは、ご自宅など漏れても処置できる場所でご使用下さい。また、よく慣れるまで練習をして、適切にご使用下さい。
- ・皮膚に異常がみられた場合は、ただちに使用を中止して下さい。
- ・体質によっては長時間の装着により、かゆみ、かぶれ等が生じることもあります。
- ・臭いや感染症のもととなる細菌やカビの繁殖を防ぐため、各製品の洗浄、消毒乾燥など衛生面には十分注意して下さい。また、使いまわしは厳禁です。
- ・立位または座位でご使用下さい。
- ・本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではありません。
- ・当社が推奨する方法以外の方法で本製品を使用した場合、身体的障害またはその他の損失に対して一切責任は負いません。
- ・本製品に改造、改変等を加えて使用した場合でのトラブルには応じかねます。
- ・尿の流れを確保するため、レシーバーと収尿ボトルとの高低差をつけてご使用下さい。
- ・直射日光を避け、室温で乾燥した場所に保管して下さい。

- 意匠登録
米国 (US): No.29/531,092
日本 (JP): 1530263
欧州 (EU): 002675058-0001
- 商標登録
日本 (JP): 5789413
欧州 (EU): 1259233



<http://www.asahi-sg.co.jp>

お問合せ・ご連絡窓口

Tel (052) 684-6829

FAX 052-671-5196

朝日産業株式会社 医療機器事業部
medical@asahi-sg.co.jp

製造・販売元

朝日産業株式会社

〒456-0051
名古屋市熱田区四番一丁目11番22号




ご使用の手引き

「Mr. ユリナー」は、快適な装着を維持出来るよう、様々な工夫がなされています。昼間に安心して外出したい方、外でのお仕事や軽作業をされる場合などあなたの快適ライフをサポートします。

Mr. ユリナーを快適にご利用頂くためには、特徴を理解し、慣れることが重要です。骨格や体質が人それぞれ違うように、装着（特にクリップの固定）位置は、人それぞれ若干異なります。初めに漏らしてもご使用をやめず、使い方を工夫しながら排尿できるようにすることが大切です。

慣れるまでは万が一に備えて、必ずご自宅等安心できる場所でお試しいただいてから、外出先等での快適ライフにご活用ください。

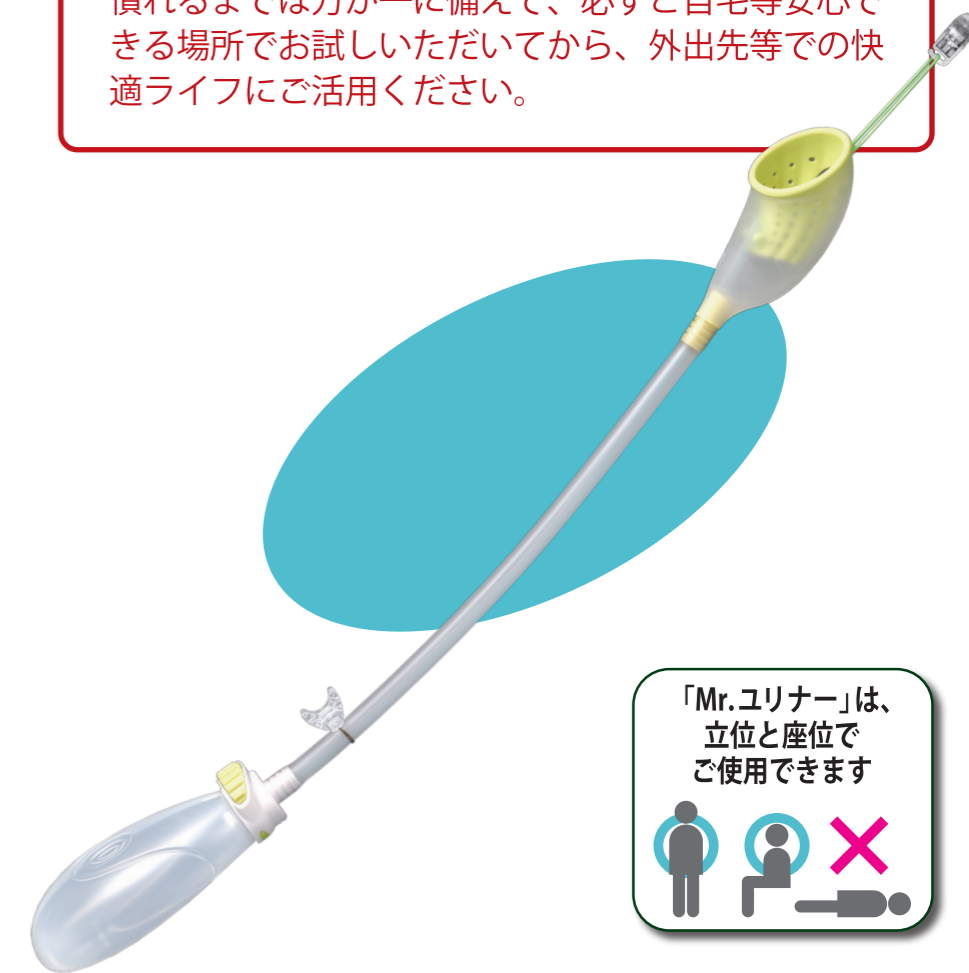

「Mr. ユリナー」は、立位と座位でご使用できます




ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、必ずいつでも見られるところに保管してください。

体に納める位置

〈正面〉
ペニスをレシーバーの中に納め、上クリップを、下着やズボン等の内側に噛ませ、安定させます。

〈側面〉
チューブは足に沿わせ、収尿ボトルはふくらはぎの下辺りに納まるように下部クリップをズボンの内側に噛ませます。

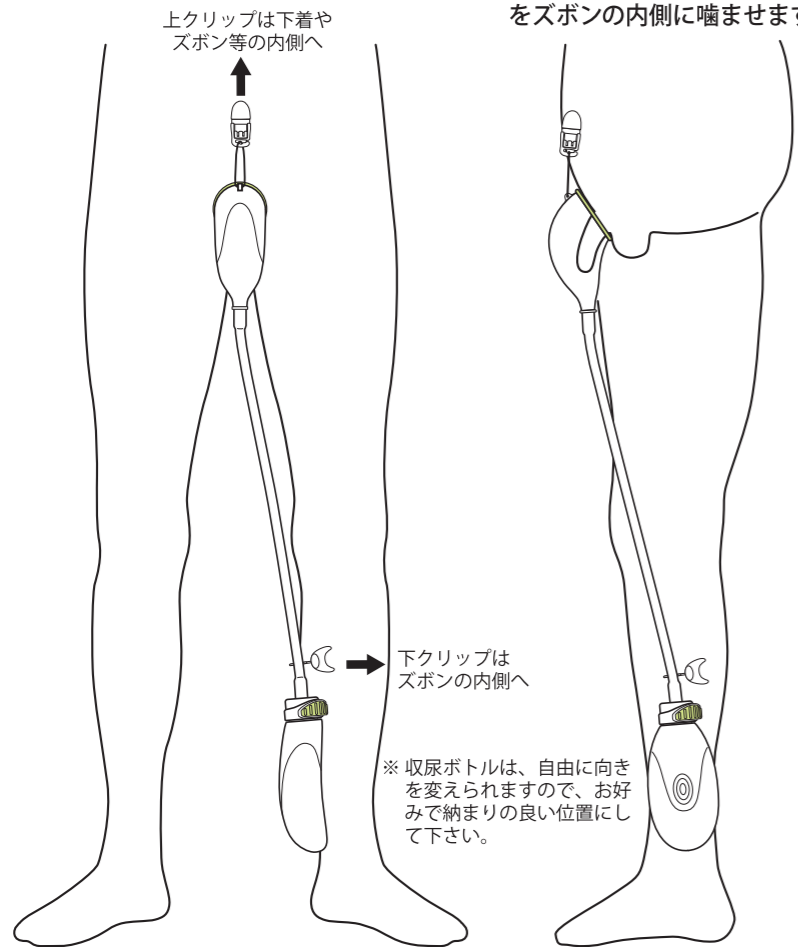

上クリップは下着やズボン等の内側へ

下クリップはズボンの内側へ


※収尿ボトルは、自由に向きを変えられますので、お好みで納まりの良い位置にしてください。

取り付け方

1 収尿ボトルをチューブから外しておき、ブリーフの下からチューブを足に沿って出します。

3 上クリップを、下着やズボン等の丈夫な所へ咬ませます。

※場所はご自分の好みによって決めて下さい。

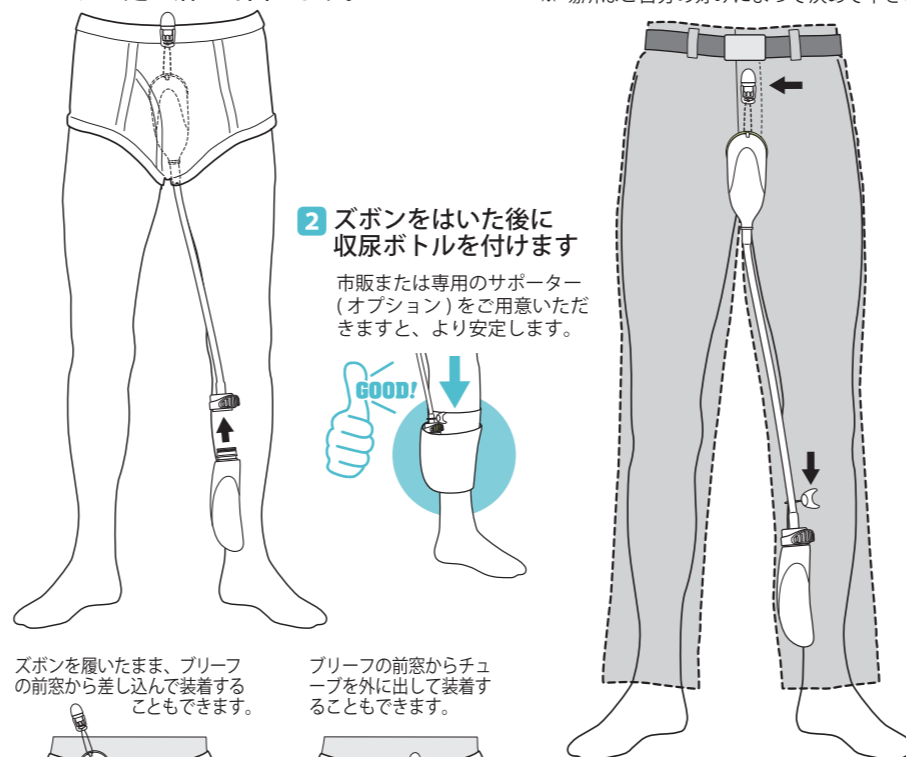


2 ズボンをはいた後に収尿ボトルを付けます

市販または専用のサポーター(オプション)をご用意いただけますと、より安定します。



ズボンを履いたまま、ブリーフの前窓から差し込んで装着することもできます。

ブリーフの前窓からチューブを外に出して装着することもできます。

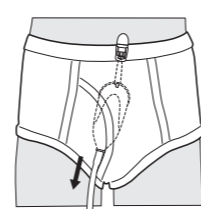

※下着はレシーバーを固定しやすいビタリとしたブリーフ、ボクサータイプが適しています。

ズボンは、若干太めのものを着用することで脱着しやすく、外から目立ちにくくなります。

4 下クリップを、ズボン内側の皮膚に痛くない所へ咬ませます。

※収尿ボトルを、足の形に添って邪魔にならないよう向きを整えます。

手入れの仕方


毎日のお手入れ 〈汚れの除去・洗浄→消毒→すすぎ→乾燥〉

● 汚れの除去・洗浄


適当な容器で、トイレ用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に数分間浸した後、柔らかいスポンジ等で洗浄してください。ボトル内部の汚物除去は歯ブラシ等を使うと便利です。

1 風呂桶等にぬるま湯を入れ、トイレ用中性洗剤を混ぜて浸す

2 柔らかいスポンジで洗う

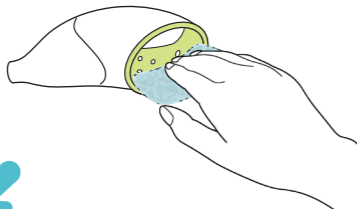

3 水で洗い流す

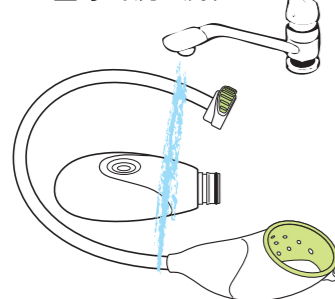

汚れが目立つときは

長期の使用での尿石や蛋白質などの汚れは、クエン酸溶液(5%程度)に20分間程浸して汚れを除去し、洗浄してください。また、市販の尿瓶用洗剤などもお使いいただけます。

● 消毒


収尿ボトルにアルコール系の消毒液を入れ、ボトルを手でゆっくりと数回押し潰して、チューブおよびレシーバー内部の消毒を行ってください。(下図参照)

1 消毒液をボトルに入れ、チューブにセットする。




※消毒は、市販の消毒用エタノール(濃度80%前後)を希釈せずにそのままお使い下さい。

2 ボトルを逆さまに持って、正面の◎印部分を指でゆっくり数回押し、カップの内部まで消毒液をフクフクさせて洗う。

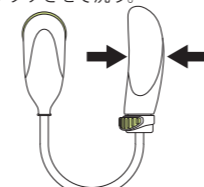

※この時、レシーバーの中を覗き込まないで下さい。消毒液が目に入ると危険です。

3 元に戻して消毒液を捨てたら洗浄完了。ふたたびキャップにセットします。

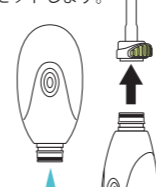

● すすぎ・乾燥


水またはぬるま湯で、しっかりとすすぎ、直射日光の当たらない風通しの良い場所で、充分乾燥させてください。

● 都度のお手入れ

・収尿ボトルに貯まった尿を捨てた時や、ご使用後はすみやかに水洗いすることで汚れの付着を軽減することができます。
・臭いや汚れが気になる場合は必要に応じてレシーバーや収尿タンクをこまめに水洗いしてください。

レシーバーとチューブの組み方

レシーバー内の二重カップを外して洗浄した後に組み際は内側の通気用チューブの先端を内カップの下側にある2つの爪の間に納めて下さい。

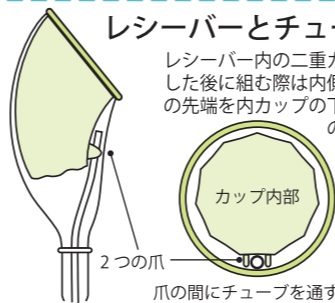

2つの爪

爪の間にチューブを通す

よくあるご質問

- Q** 臥位(寝た状態)での使用は、できますか?
Mr.ユリナーは、立位または座位で使用が可能です。座位に対しては重力を利用した構造上、チューブがペニスより上となる使い方(逆さ)はできません。
- Q** カップ(レシーバー部分)が大きすぎませんか?
通気性を考慮し、ゆとりを持たせた構造となっております。
- Q** 交換の目安は?
チューブの硬化・劣化が交換の目安です。劣化は漏れの原因となります。小まめに洗浄・清潔を保つことで長くご使用いただけます。
- Q** 長期間使用しないときは?
取扱い説明書に従って、洗浄・乾燥させたのち、高温多湿は避け清潔な場所でチューブが折れ曲がらないようにして、保管してください。
- Q** 収尿ボトルの容量はどれくらいですか?
小ボトルは約250ml、大ボトルは約350mlです。大容量の600mlボトル(オプション)もございます。
- Q** 洗浄の頻度はどれくらいですか?
不衛生は感染症のリスクが高まるため、外出先では排尿の都度洗浄いただくことをお勧めいたします。
- Q** クリップの取付位置は?
下着、ズボン、上着(肌着)など、ご使用の状況に合わせてお好きな位置にとめてください。
- Q** クリップだけで落下しませんか?
衣服をしっかり挟む構造で強力に挟み、クリップ以外にもレシーバーは下着などで支えられるため、落下することはまずありませんが、心配な場合は、専用のガーターやサポーター(オプション)をお使い頂くと安心です。



おすすめアドバイス

収尿ボトルの口元についている「ゴム製のリング」へ、ワセリン等の潤滑剤を塗布して頂くと、より滑らかに脱着できます。

上クリップは、2個入っていますので図の様に 2個お使いいただくことができます。レシーバーが、より安定します。

