
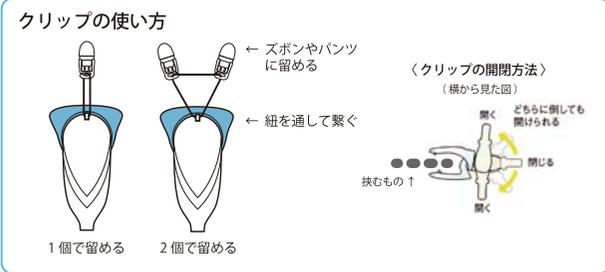


同梱品 および各部の名称と機能

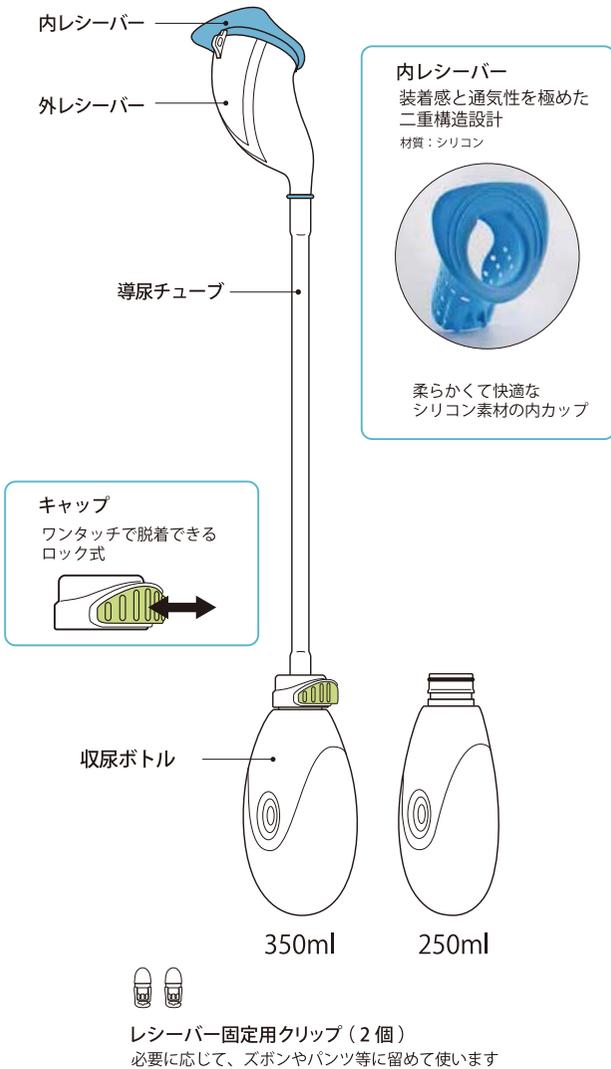

材質・仕様

材質

- ・レシーバー/シリコン
- ・チューブ/外チューブ: ポリ塩化ビニル (PVC)
- ・内チューブ: シリコン
- ・ボトル/ポリエチレン (PE)
- ・キャップ/ポリアセタール (POM)

サイズ

Sサイズ

- ・股下 ~72cm まで
- ・目安身長 ~160cm まで
- ・ユリナー全長
250 ml ボトル装着時 / 55 cm
350 ml ボトル装着時 / 56,5 cm

Mサイズ

- ・股下 72 ~ 77cm
- ・目安身長 160 ~ 170 cm
- ・ユリナー全長
250 ml ボトル装着時 / 60 cm
350 ml ボトル装着時 / 61,5 cm

Lサイズ

- ・股下 77cm ~
- ・目安身長 170cm ~
- ・ユリナー全長
250 ml ボトル装着時 / 65 cm
350 ml ボトル装着時 / 66,5 cm

保証・返品について

※商品の返品・交換について

衛生商品のため、一度使用、または着用された場合は返品をお断りしております。開封前に必ず足に沿わせて合わせる等し、サイズを確認して下さい。万一、お届けした商品が破損・サイズ違いの場合は、お手数ではございますが到着後 10 日以内にご連絡下さい。送料当社負担で良品とお取替えいたします。

注意事項



注意

- ・ご使用になる前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ・使い慣れるまでは、ご自宅など漏れても処置できる場所でご使用下さい。また、よく慣れるまで練習をして、適切にご使用下さい。
- ・皮膚に異常がみられた場合は、ただちに使用を中止して下さい。
- ・体質によっては長時間の装着により、かゆみ、かぶれ等が生じることもあります。
- ・臭いや感染症のもととなる細菌やカビの繁殖を防ぐため、各部品の洗浄、消毒乾燥など衛生面には十分注意して下さい。また、使いまわしは厳禁です。
- ・立位または座位でご使用下さい。
- ・本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではありません。
- ・当社が推奨する方法以外の方法で本製品を使用した場合、身体的障害またはその他の損失に対して一切責任は負いません。
- ・本製品に改造、改変等を加えて使用した場合でのトラブルには応じかねます。
- ・尿の流れを確保するため、レシーバーと収尿ボトルとの高低差をつけてご使用下さい。
- ・直射日光を避け、室温で乾燥した場所に保管して下さい。

製品は品質向上のため、常に改良や仕様変更をしておりますので、お手元の製品がこの取扱説明書の図や写真と異なる場合があります。ご了承くださいませ。

- 意匠登録
米国 (US): No.29/531,092
日本 (JP): 1530263
欧州 (EU): 002675058-0001
- 商標登録
日本 (JP): 5789413
欧州 (EU): 1259233

お問合せ・ご連絡窓口

Tel (052) 684-6829
FAX 052-671-5196

朝日産業株式会社 医療機器事業部
medical@asahi-sg.co.jp

製造・販売元

朝日産業株式会社
〒456-0051
名古屋市中熱田区四番一丁目11番22号

<http://asahi-sg.co.jp>



ご使用の手引き

「Mr. ユリナー」は、快適な装着を維持出来るよう、様々な工夫がなされています。昼間に安心して外出したい方、外でのお仕事や軽作業をされる場合などあなたの快適ライフをサポートします。

Mr. ユリナーを快適にご利用頂くためには、特徴を理解し、慣れることが重要です。骨格や体質が人それぞれ違うように、装着 (特にクリップの固定) 位置は、人それぞれ若干異なります。初めに漏らしてもご使用をやめず、使い方を工夫しながら排尿できるようにすることが大切です。

慣れるまでは万が一に備えて、必ずご自宅等安心できる場所でお試しいただいてから、外出先等での快適ライフにご活用ください。




ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、必ずいつでも見られるところに保管してください。

体に納める位置

〈正面〉
ペニスをレシーバー
の中に納めます。

〈側面〉
チューブは足に沿わせ、収尿ボトル
はふくらはぎの下辺りに納めます。

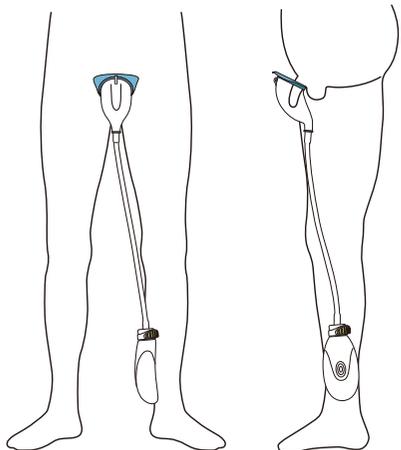

※ 収尿ボトルは、自由に向きを変えられるので、お好みで納まりの良い位置にしてください。

チューブの角度に注意して下さい。

Mr. コリナーは、重力を利用して収尿する構造です。座位で使用する場合は、レシーバー(ペニス)が一番高い位置にないと尿が収尿ボトルにうまく流れません。



手入れの仕方

毎日のお手入れ 〈汚れの除去・洗浄→消毒→すすぎ→乾燥〉

● 汚れの除去・洗浄


適当な容器で、トイレ用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に数分間浸した後、柔らかいスポンジ等で洗浄してください。ボトル内部の汚物除去は歯ブラシ等を使うと便利です。

1 風呂桶等にぬるま湯

を入れ、トイレ用中性洗剤を混ぜて浸す



2 柔らかいスポンジで洗う

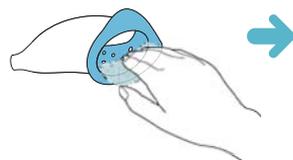

3 水で洗い流す



● すすぎ・乾燥

水またはぬるま湯で、しっかりとすすぎ、直射日光の当たらない風通しの良い場所で、充分乾燥させてください。

● 都度のお手入れ

・収尿ボトルに貯まった尿を捨てた時や、ご使用後はすみやかに水洗いすることで、汚れの付着を軽減することができます。
・臭いや汚れが気になる場合は必要に応じてレシーバーや収尿タンクをこまめに水洗いしてください。


● 汚れが目立つときは

長期の使用での尿石や蛋白質などの汚れは、クエン酸溶液(5%程度)に20分間程浸して汚れを除去し、洗浄してください。また、市販の尿瓶用洗剤などもお使いいただけます。

レシーバーの取り付け方

1 ご自身のパンツで使う場合

同梱のクリップを、図のように紐で繋げてパンツの上部に挟み、安定させます。

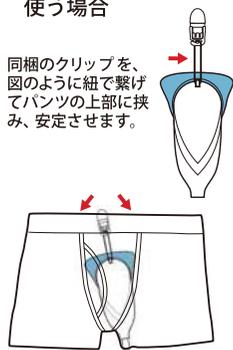


チューブを、パンツの下部から外に出し、足に沿わせず。

2 専用ガーター(オプション MUR102)を使う場合



使用方法や取り付け方の手順は、製品パッケージの説明に従ってください。


3 専用パンツ(オプション KUR102)を使う場合

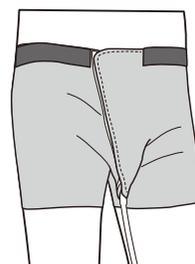

使用方法や取り付け方の手順は、製品パッケージの説明に従ってください。

収尿ボトルの取り付け方

1 そのままで使う場合

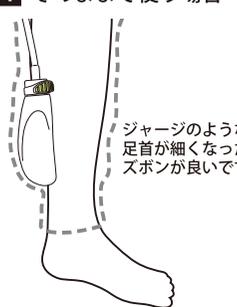

ジャージのような足首が細くなったスポンジが良いです。

2 市販のサポーターを使う場合



サポーターを折り返して、ポケットのようにし、収尿ボトルを納めます。

3 専用サポーター(オプション MUR103)を使う場合



サポーターの網のポケットに、収尿ボトルを納めます。

Q&A

よくあるご質問

- [Q] 臥位(寝た状態)での使用は、できますか?
Mr. コリナーは、立位または座位で使用が可能です。座位に対しては重力を利用した構造上、チューブがペニスより上となる使い方(逆さ)はできません。
- [Q] カップ(レシーバー部分)が大きすぎませんか?
通気性を考慮し、ゆとりを持たせた構造となっております。
- [Q] 交換の目安は?
チューブの硬化・劣化が交換の目安です。劣化は漏れの原因となります。小まめに洗浄、清潔を保つことで長くご使用いただけます。
- [Q] 長期間使用しないときは?
取扱説明書に従って、洗浄・乾燥させたのち、高温多湿は避け清潔な場所でチューブが折れ曲がらないようにして、保管してください。
- [Q] 収尿ボトルの容量はどれくらいですか?
小ボトルは約250ml、中ボトルは約350mlです。大容量の600mlボトル(オプション)もございます。
- [Q] 洗浄の頻度はどれくらいですか?
不衛生は感染症のリスクが高まるため、外出先では排尿の都度洗浄いただくことをお勧めいたします。

おすすめアドバイス

装着に適したパンツの形

ご自身のパンツで装着する場合は、体にフィットする形のパンツで装着するとレシーバーが安定しやすくなります。



収尿ボトルの脱着をよりスムーズに!

収尿ボトルの口元についている「ゴム製のリング」へ、ワセリン等の潤滑剤を塗布して頂くと、より滑らかに脱着できます。



レシーバーとチューブの組み方

レシーバー内の二重カップを外して洗浄した後には組み立ての際は内側の通気用チューブの先端を内カップの下側にある2つの爪の間に納めて下さい。

