



より快適にお使いいただくために！

ご愛用の方々の工夫、アイデアをご紹介します

より快適にお使いいただけるアイデアを、ぜひご参考になさってください。


私の工夫
1
愛知県在住
Tさん65歳

下着は、ピッタリとしたブリーフ型を選び、クリップをうまく使うこと。

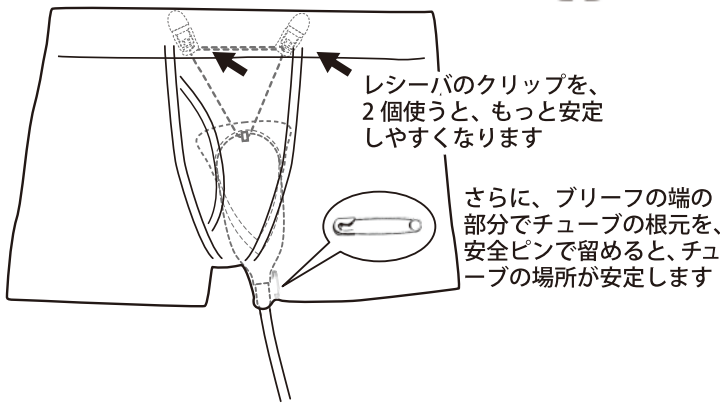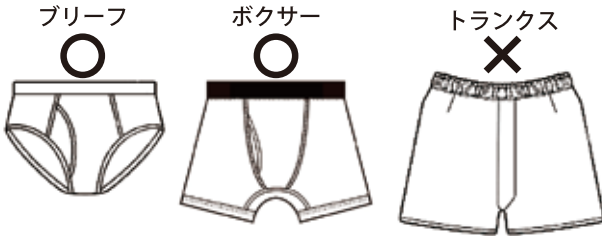


私の工夫
3
福岡県在住
Sさん78歳

紙オムツを重ねて使うと、うまく流れずに失敗する。

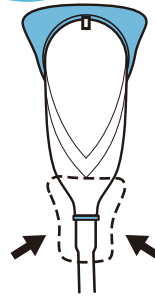

漏れが心配な場合は、レシーバの根元周囲に小さいパッドを巻くと良いでしょう

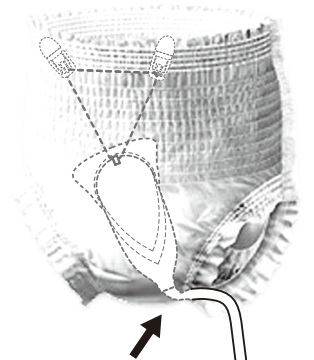

私の工夫
2
東京都在住
Hさん71歳


ももひきを着用する時は穴をあけて、チューブを出すととても使いやすくなる。




私の工夫
4
岐阜県在住
Oさん66歳

ボトルの安定には市販のサポーターを利用するとフィットする。


1 市販のサポーターを1枚用意します

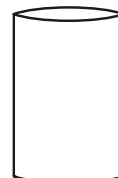


2 下から上へ、折り返します

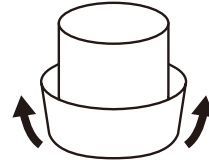

3 その間のすき間にボトルを納めます

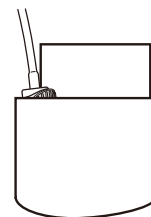

ふくらはぎに納めた状態

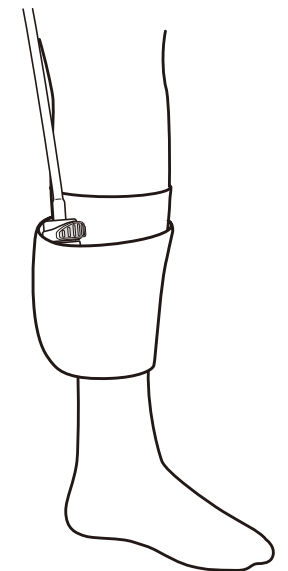

サポーター以外にも、伸縮式ネット包帯やストッキングを輪切りにしたもの、ハイソックス等を利用する方もいらっしゃいます。

この他にも良いアイデアがありましたらぜひお知らせ下さいませ。ご愛用者にお伝えさせていただきます。

朝日産業株式会社 医療機器事業部

Tel (052) 684-6829 (直) Fax (052) 671-5196

E-mail : medical@asahi-sg.co.jp